

EM-200

Desinfektionskonzentrat

Speziell für die Ultraschallreinigung entwickelt!

Eigenschaften:

EM-200 desinfiziert und reinigt chirurgische Instrumente aller Art inkl. MIC-Instrumente und thermolabile Materialien. **Dosierung (nach VAH):** Dosierung je nach Verschmutzungsgrad und Fullvolumen. Zur Instrumentendesinfektion und -reinigung inkl. TBC/MRSA: 1% - 60 min; 2% - 30 min; 3% - 15 min. HIV/HBV: 1% - 60 min; 2% - 15 min. HCV: 1% - 5 min. Adeno: 2% - 60 min; 4% - 30 min. Papova: 1% - 60 min; 2% - 30 min.

Zusammensetzung:

In 100g sind enthalten: 3,75 g Cocospropylen-diaminguanidiniumdiacetat 5,63 g Didecylmethyloxyethylammoniumpropionat **Gefahr:** N-Didecyl-N-methylpoly (oxyethyl) ammonium-propionat, Alkoholethoxylat C9-C11 Alkylpropyldiamin-1,5-bis-guanidiniumacetat, Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. Kein Erbrechen herbeiführen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Freisetzung in die Umwelt.

Anwendung

Instrumente, ggf. nach vorheriger Grobreinigung, in die Gebrauchslosung einlegen und mechanisch reinigen. Sämtliche Oberflächen und Hohlräume müssen von der Gebrauchslosung vollständig benetzt sein. Nach Ablauf der Einwirkzeit die Instrumente gründlich mit Wasser abspülen und weiter aufbereiten.



erhältlich nur in 500 ml