



Sehr geehrte Anwender,

um die korrekte Funktion der Geräte zu sichern, empfehlen wir Kontrollmaßnahmen und deren Dokumentation nach folgendem Zeitplan:

monatlich*	jährlich	alle 2 Jahre
Kalibrierung	Überprüfung des Sensors	Wechsel Backup-Batterie und Sensor

* Je nach Häufigkeit der Nutzung und Abweichung des Sensors vom Zielwert der Kalibrierung kann das Kalibrierintervall auf bis zu 90 Tage verlängert werden.

FAN empfiehlt für höchste Messgenauigkeit und Sensorlebensdauer eine monatliche Kalibrierung.

Weiterführende Informationen finden Sie in der Gebrauchsanweisung.

Als Hilfestellung im täglichen Einsatz bieten wir Ihnen eine Checkliste zur Qualitätssicherung an.

Besuchen Sie auch unsere Homepage www.fan-gmbh.de. Hier finden Sie ein **Hilfevideo** zur Anwendung des H₂-Atemtestgeräts und unter „**Kontakt & Hilfe**“ Antworten zu häufig gestellten Fragen.