

⚠ VORSICHT!

- **Diese Kurzanleitung ist nicht als Alternative zur Lektüre der Benutzerunterstützung vorgesehen.** Bitte lesen Sie die Benutzerunterstützung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden.

cobas® click

Kurzanleitung
Dokumentversion 1.0
Softwareversion 1.0

Dieses Dokument ist die Kurzanleitung für **cobas® click**. Ausführliche Informationen finden Sie in der **cobas® click** Benutzerunterstützung.

Die elektronische Benutzerdokumentation kann über den eLabDoc E-Service im navify Portal heruntergeladen werden:

<https://navifyportal.roche.com>

Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich an einen Servicemitarbeiter vor Ort.

Eine Liste aller Roche Standorte finden Sie unter:

www.roche.com/about/business/roche_worldwide.htm





 Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany

In Japan für Roche Diagnostics hergestellt.
© 2020–2024, Roche Diagnostics. Alle Rechte vorbehalten.

COBAS CLICK, ACCU-CHEK und **NAVIFY** sind Marken von Roche.

Alle anderen Produktnamen und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.



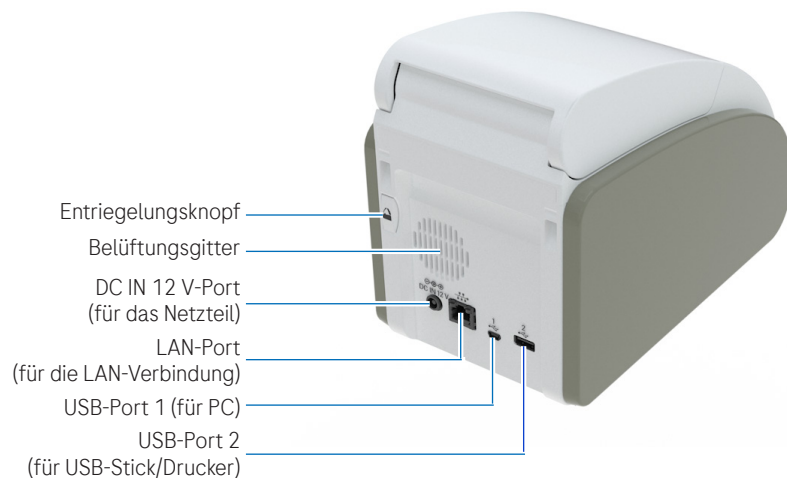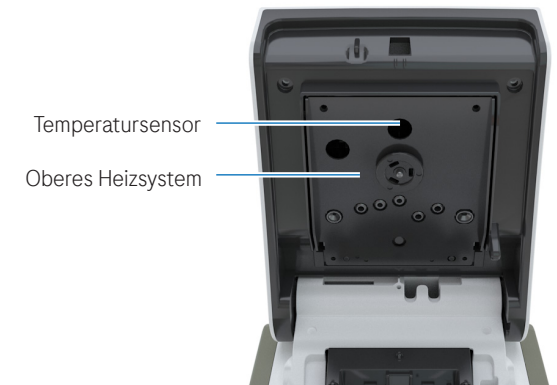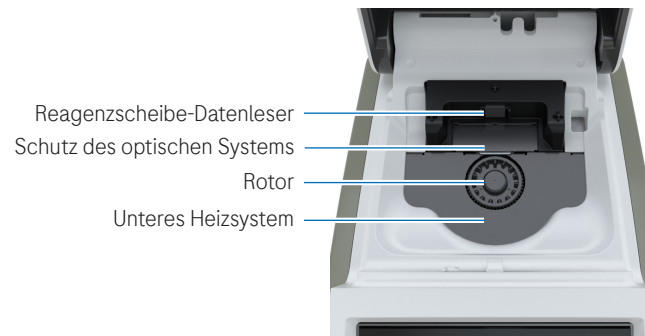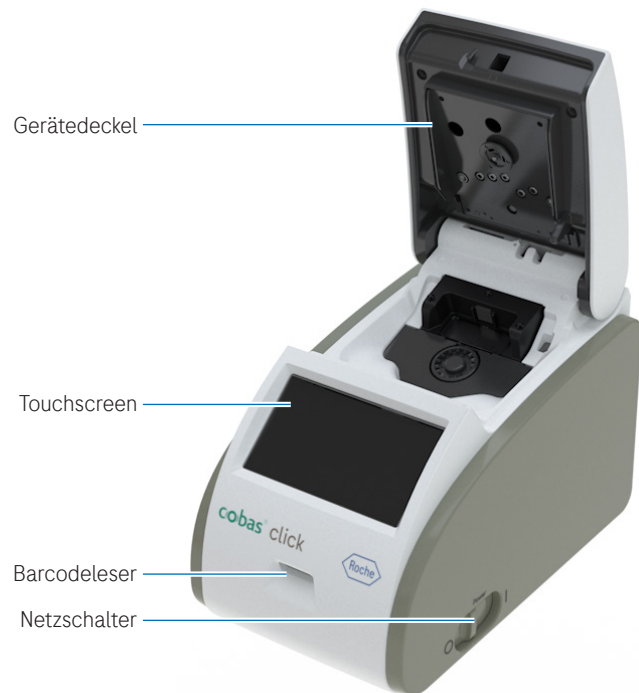

Starten des Gerätes

1. Schalten Sie das Gerät mit dem Netzschalter an der Seite des Geräts ein.
Das Gerät führt automatisch Selbsttests durch.
2. Melden Sie sich mit Ihrer Benutzer-ID und Ihrem Kennwort an.
3. Der Bildschirm **Hauptmenü** wird angezeigt.



Ausschalten des Geräts

1. Achten Sie darauf, dass das Gerät keinen Test mehr bearbeitet.
2. Wählen Sie im **Hauptmenü** die Schaltfläche  und anschließend  aus, um sich abzumelden.
3. Schalten Sie das Gerät mit dem Netzschalter an der Seite des Geräts aus.



Durchführung eines QK-Tests

Benötigte Materialien:

Bei jedem QK-Test (HbA1c, Lipid, CRP):




- Control Gen. 2 (Flaschen für Level 1 und 2)
- Werteblatt (1)
- Test Gen. 2 (x2)




Hinweis:

Diese Schritte sind bei allen QK-Tests (HbA1c, Lipid, CRP) gleich. Der Übersichtlichkeit halber werden nicht alle Bilder und Screenshots für jeden Test angezeigt.

1. Wählen Sie im **Hauptmenü** die Option **QC** und dann **QK-Test** aus.
2. Wählen Sie für eine neue QK-Charge die Schaltfläche **Neue QK-Charge** oder eine Chargenschaltfläche, um eine bereits verwendete QK-Charge auszuwählen.
3. Wenn Sie eine neue QK-Charge benötigen, scannen Sie den QR-Code auf dem Werteblatt.
4. Wählen Sie alternativ  aus und geben Sie den 32-stelligen Code, den Sie unter dem QR-Code des Werteblatts finden, manuell ein.
5. Die Zielwerte und Zielbereiche für Level 1 und 2 werden angezeigt. Bestätigen Sie die Werte mit . Die QK-Informationen werden im System gespeichert.
6. Wählen Sie das Level des QK-Tests (**Level 1** oder **Level 2**) aus.

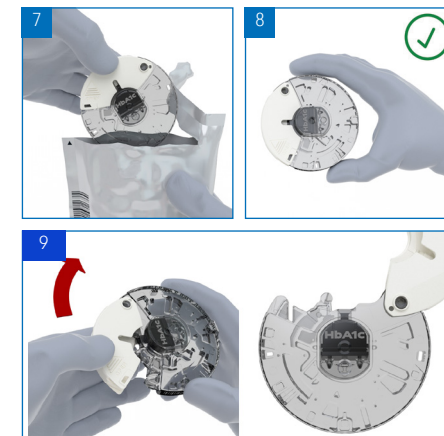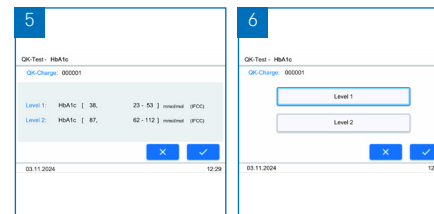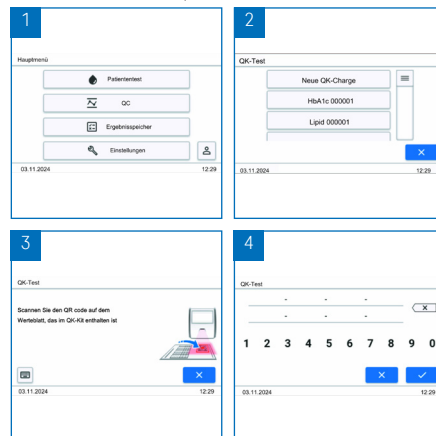


10. Überprüfen Sie, ob das QK-Material den richtigen Füllstand hat. Tragen Sie vorsichtig einen Tropfen des QK-Materials auf den Probeneinlass auf.
11. Überprüfen Sie das Probenvolumen. Achten Sie darauf, dass der transparente Punkt vollständig mit QK-Material bedeckt ist.

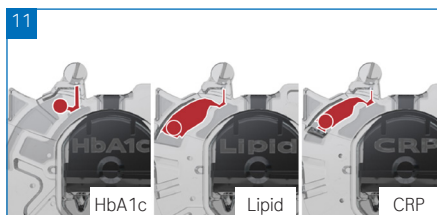

12. Schließen Sie die Abdeckung der Reagenzscheibe fest. Wenn die Abdeckung der Reagenzscheibe richtig geschlossen ist, kann sie nicht mehr geöffnet werden.
13. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Reagenzscheibe einzusetzen.
14. Stellen Sie sicher, dass die Werte für **QK-Charge**, **Parameter** und **Level** mit den auf dem Bildschirm angezeigten übereinstimmen. Wählen Sie zum Starten des Tests  aus.
15. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um mit dem nächsten QK-Level fortzufahren.
16. Öffnen Sie die zweite Schutzhülle und entnehmen Sie die Reagenzscheibe. Tragen Sie das QK-Material des anderen Levels auf die zweite Reagenzscheibe auf, wie in den Schritten 8 bis 12 beschrieben.
17. Wählen Sie **Öffnen** aus, um die Geräteabdeckung zu öffnen. Entnehmen Sie die erste Reagenzscheibe. Setzen Sie die zweite Reagenzscheibe ein und schließen Sie die Geräteabdeckung.



18. Stellen Sie sicher, dass die Werte für **QK-Charge**, **Parameter** und **Level** mit den auf dem Bildschirm angezeigten übereinstimmen. Wählen Sie zum Starten des Tests  aus.
19. Nach Abschluss des Tests werden die Ergebnisse beider Level (1+2) angezeigt. Wählen Sie zum Abschluss des Tests  aus, entnehmen Sie die Reagenzscheibe und schließen Sie die Geräteabdeckung.
20. Entsorgen Sie die Reagenzscheiben gemäß den örtlichen gesetzlichen Bestimmungen.

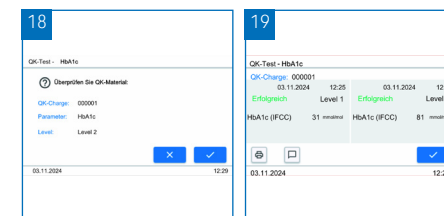

Probenvorbereitung (Präanalytik)




1. Bitten Sie den Patienten, sich die Hände mit warmem Wasser und Seife zu waschen, um fettige Substanzen zu entfernen. Spülen Sie sämtliche Seifenreste mit reichlich Wasser von den Fingern ab.
2. Trocknen Sie die Hände mit Papiertüchern gründlich ab.
3. Massieren Sie die Finger, um die Durchblutung anzuregen.





Hinweis:

Alternativ zur Durchführung eines Tests mit Kapillarblut können Sie auch mit K2/K3-EDTA antikoagulierte venöses Vollblut verwenden. Entnehmen Sie das Blut mit einer Pipette aus einem Fläschchen. Entsorgen Sie gebrauchtes Material (d. h. Reagenzscheiben, Einwegstechhilfen) stets im Einklang mit den örtlichen Entsorgungsanweisungen bzw. den Vorschriften Ihrer Einrichtung und den örtlichen Gesundheitsvorschriften.

4. Wischen Sie die Seite des Fingers 3-mal mit einem Alkoholtuch ab.
5. Wiederholen Sie die Fingerreinigung mit einem anderen Alkoholtuch.
6. Trocknen Sie den Finger mit einer sterilen Gaze ab.
7. Bereiten Sie die Einwegstechhilfe (z. B. Accu-Chek Safe-T-Pro Plus) vor und stellen Sie sie auf die größte Lanzettentiefe ein.
8. Punktieren Sie die gereinigte Seite der Fingerbeere.
9. Wischen Sie den ersten Blutstropfen ab.

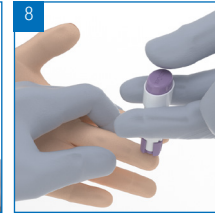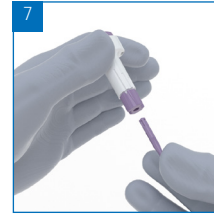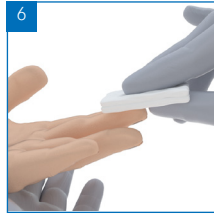

10. Drücken Sie vorsichtig auf beide Seiten des Fingers, um einen neuen Tropfen freizusetzen. Bilden Sie vor dem Auftragen einen ausreichend großen Blutstropfen aus dem Finger ab.
11. Wenn der Blutstropfen zu klein ist, halten Sie die punktierte Seite nach unten und üben Sie wiederholten leichten Druck aus. Vermeiden Sie starken Druck und das Melken der Finger.

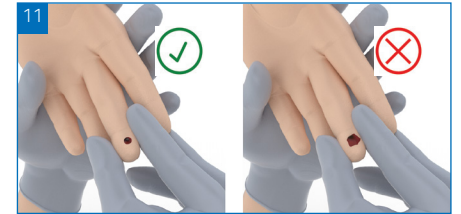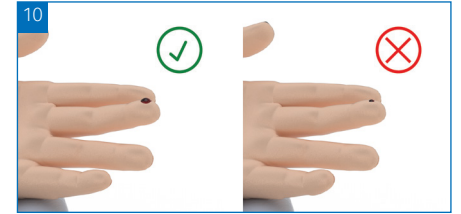

Durchführen eines Patiententests

1. Wählen Sie im Bildschirm **Hauptmenü** die Option **Patiententest**.
2. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, geben Sie Ihre Benutzer-ID und Ihr Kennwort ein.
3. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, geben Sie die Patientendaten ein (z. B. eine Patienten-ID).







Hinweis:

Diese Schritte sind bei allen Patiententests (HbA1c, Lipid, CRP) gleich. Der Übersichtlichkeit halber werden nicht alle Bilder und Screenshots für jeden Test angezeigt.

Gehen Sie zur Vorbereitung einer Blutprobe nach den im Abschnitt „Probenvorbereitung (Präanalytik)“ beschriebenen Schritten vor.

4. Öffnen Sie die Schutzhülle und entnehmen Sie die Reagenzscheibe.
5. Halten Sie die Reagenzscheibe korrekt fest. Die transparenten Bereiche der Reagenzscheibe dürfen nicht berührt werden.
6. Öffnen Sie die Abdeckung der Reagenzscheibe vollständig.
7. Positionieren Sie den Probeneinlass der Reagenzscheibe über dem Blutstropfen. Tragen Sie das Blut auf den Probeneinlass auf.
8. Überprüfen Sie das Probenvolumen. Vergewissern Sie sich, dass der transparente Punkt vollständig mit Blut gefüllt ist.
9. Schließen Sie die Abdeckung der Reagenzscheibe fest. Wenn die Abdeckung der Reagenzscheibe richtig geschlossen ist, kann sie nicht mehr geöffnet werden.

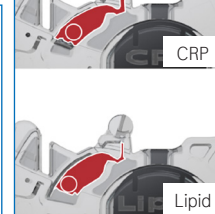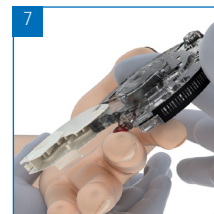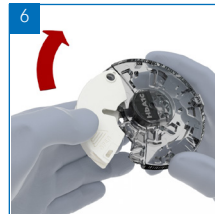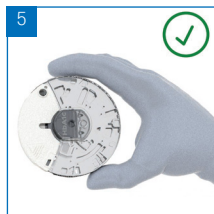

10. Setzen Sie die Reagenzscheibe sofort ein.
11. Schließen Sie die Geräteabdeckung. Der Test startet automatisch und dauert etwa 4 bis 6 Minuten.
12. Wenn der Test beendet ist, werden die Ergebnisse angezeigt. Wählen Sie zum Abschluss des Tests ✓ aus, entnehmen Sie die Reagenzscheibe und schließen Sie die Geräteabdeckung.
13. Entsorgen Sie die Reagenzscheiben gemäß den örtlichen gesetzlichen Bestimmungen.

