



### Deutsch

#### Anwendungszweck

Der CoaguChek XS PT Test PST ist ein In-vitro-Test zur Bestimmung der Prothrombinzeit (PT) zur Überwachung einer Therapie mit Vitamin-K-Antagonisten mithilfe des CoaguChek INRange / CoaguChek XS Messgeräts. Für den Test wird frisches Kapillarovollblut verwendet. Der Test ist ausschließlich für die Selbstanwendung durch den Patienten vorgesehen.

① Dieses Symbol weist Sie auf wichtige Informationen hin.

**⚠** Kontrollieren Sie, dass die Nummer des Code-Chips mit der Code-Nummer auf der Teststreifendose übereinstimmt. Wenn Sie eine neue Teststreifen-Charge beginnen, müssen Sie erst den mit den Teststreifen gelieferten Code-Chip einsetzen, um den Test durchführen zu können.








- Die verwendete Blutportion muss ein Auftragsvolumen von mindestens 8 µL haben. Ein zu geringes Probenvolumen führt zu einer Fehlermeldung.
- Haben Sie den Test genau so ausgeführt, wie im Benutzerhandbuch des entsprechenden Messgeräts und im Abschnitt „Erhalt eines geringen Tropfens Kapillarblut“ hier beschrieben? Bitte lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch.
- Vergewissern Sie sich stets, dass die Teststreifen ordnungsgemäß gelagert wurden (siehe Abschnitt „Lagerung und Haltbarkeit“) und diese nicht länger als 10 Minuten vor Testdurchführung aus der Teststreifendose entnommen wurden.
- **Bitte überprüfen Sie Datum und Zeit** auf der Anzeige des Messgeräts. Fehlerhafte Einstellungen können zu einer Fehlermeldung führen.
- Ist die Teststreifenführung verschmutzt? Reinigen Sie das Messgerät wie im Benutzerhandbuch beschrieben. Wiederholen Sie die Messung mit einem neuen Teststreifen.

- ① Wiederholen Sie den Test mit einem neuen Teststreifen. Erscheint die Fehlermeldung mehrmals, müssen Ihre Ergebnisse mit einer anderen Testmethode überprüft werden. Setzen Sie sich bitte umgehend mit Ihrem behandelnden Arzt in Verbindung.



-  Hersteller

Ergänzungen, Streichungen oder Änderungen sind durch eine Markierung am Rand gekennzeichnet.

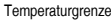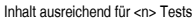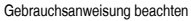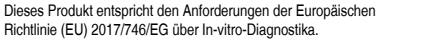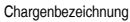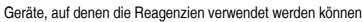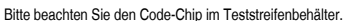

07674759001  
2023-09 V 8.0